

Rédacteur(s) SEGALA David 21/12/2022	Vérificateur(s) CADY Anne 21/12/2022	Approbateur(s) GIROUX Fanny 21/12/2022
Modifications depuis la version précédente : précision mode dégradé		

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Ce mode opératoire est applicable dans le service de Maternité

RESPONSABILITES

Les opérateurs sous la responsabilité du Biologiste Responsable des EBMD.

DEFINITIONS

-

DOCUMENTS DE REFERENCE

ISO 15189 et ISO 22870

DOCUMENTS ASSOCIES

-

DESCRIPTION

Une fois le prélèvement réalisé, l'échantillon doit être passé **le plus rapidement possible** sur l'automate.

Délais maximum entre le prélèvement et le dosage **pour une seringue = 30 minutes**

Délais maximum entre le prélèvement et le dosage **pour un capillaire = 10 minutes**

Assurez-vous que l'analyseur est **Prêt**.




Vérifier :

-la **disponibilité** de l'analyseur (**Prêt**)

-la **disponibilité** des paramètres **VERT = OK**

I. Passage d'une seringue

Echantillon satisfaisant (absence de bulles d'air, d'exposition à l'air et de caillots)

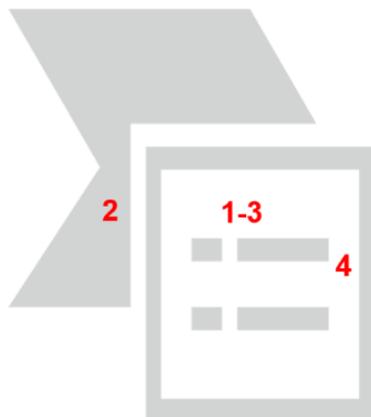

1. **S'identifier** : passer son badge sous le lecteur




2. **Homogénéiser** : placer la seringue dans le compartiment d'agitation situé à Gauche (terminé lorsque la lumière bleu clignote)

3. Scanner l'ID patient et confirmer l'identité

Appuyez sur la touche **Seringue** puis **Sélectionner le profil d'analyse désiré**.




4. Placer et maintenez la seringue contre le joint d'introduction : Poussez la seringue au maximum dans l'analyseur et maintenez-la dans cette position.

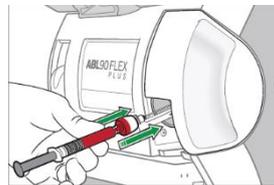


5. Enlever la seringue lorsque l'automate **bipe**.

II. Passage d'un capillaire pour pH et lactates au scalp

Echantillon satisfaisant (capillaire rempli, absence de bulles d'air)

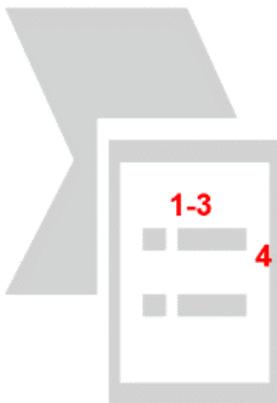

1. S'identifier : passer son badge sous le lecteur

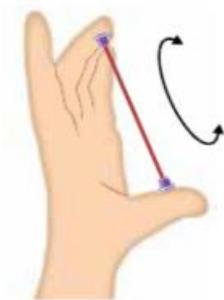

2. Homogénéiser : bien homogénéiser par **retournements lents** le capillaire contenant la limaille pour bien répartir l'héparine et éviter la formation de caillots : ce geste doit se faire entre la salle d'accouchement et la machine

3. Pencher le capillaire pour que la limaille se retrouve du côté opposé au joint d'introduction de l'ABL

Enlever le premier bouchon et placer un filtre à caillot sur l'extrémité



4. Scanner l'ID patient et confirmer l'identité

Appuyez sur la touche Capillaire puis Sélectionner le profil d'analyse désiré.



L'analyseur ouvre le site d'introduction.

5. Enlever le second bouchon, tenir le capillaire par le filtre à caillot, le positionner fermement contre le joint d'introduction et pousser délicatement au maximum dans l'analyseur ; l'aspiration se fait automatiquement

Et attendre que l'automate vous demande de le retirer

6. Enlever le capillaire lorsque l'automate **bipe**. Les résultats apparaissent sur l'écran et sont imprimés

**Pour les naissances multiples,
Après avoir scanné le code-barres d'identification de la maman, choisir cordon1,
cordon2, cordon3
Pour les naissances sous X, utiliser le code-barres anonyme X.....**

En cas de panne du système informatique :


- 1 - Assurez-vous que l'analyseur est **Prêt**.
- 2 – **Sélectionner le type de prélèvement** (Seringue / Capillaire).
- 3 - **Sélectionner le profil d'analyse désiré**.
- 4 - **Passer le prélèvement**.
- 5 - **Rentrer manuellement l'ID patient (N°IEP si disponible), le nom, le prénom, la date de naissance ainsi que le sexe du patient.**
- 6 - **Utiliser les résultats papier pour la transmission des résultats.**

Note : si affichage de l'un des messages suivants :
Action de l'opérateur nécessaire
Dépannage nécessaire ou Intervention nécessaire.
Prendre immédiatement contact avec le laboratoire


III. Entretien l'automate

Nettoyer l'écran avec une lingette ou un chiffon humecté de détergent doux; ne jamais vaporiser de produit directement sur l'écran

Nettoyer le joint d'introduction selon le calendrier défini dans l'automate

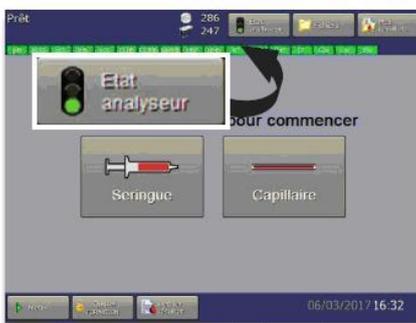

Appuyer sur la touche :
État analyseur

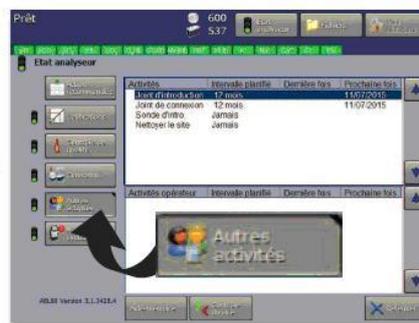

Sélectionner :
Autres activités



Puis appuyer sur la touche :
Contrôle du site



Sélectionner :
Nettoyer le joint d'intro.



Appuyer sur la touche :
Presser pour lancer le guide vidéo

Suivez les instructions décrites à l'écran (2 étapes).

Changer le papier à imprimer lorsque l'automate le demande en suivant la vidéo didactielle.