

UTILISER LA SERINGUE safePICO Aspirator POUR PRELEVER LE SANG DE CORDON

Codification :	MO_0725
Version :	3
Date d'application :	29/06/2023
Pages :	1/1

1. Préparation du prélèvement



Préparer la seringue +aiguille



Enlever la seringue du sachet

Pousser le piston jusqu'à la buté

Adapter l'aiguille

2. Réaliser le prélèvement **par aspiration**

3. Après le prélèvement




1. Mettre en place le bouchon ventilé en tournant d'un quart de tour



3. Purger directement dans le bouchon ventilé jusqu'à sentir une résistance : **le bouchon doit être rempli de sang**



2. Tapoter le corps de la seringue pour faire monter les bulles d'air

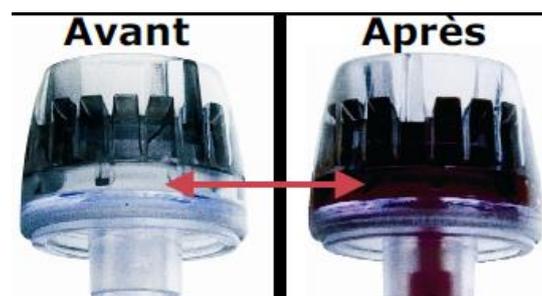

4. Homogénéiser la seringue pendant au moins 20 secondes par retournements pour dissoudre l'héparine



5. Analyser l'échantillon dans les **30** minutes maximum