


Rédacteur(s) SEGALA David 28/03/2023	Vérificateur(s) HUBERT Lise 28/03/2023	Approbateur(s) LE PROVOST Samuel 28/03/2023
Modifications depuis la version précédente :		

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	
Le CoaguCheck est utilisé pour calculer l'INR et le TCA à partir de sang capillaire	
RESPONSABILITES	DEFINITIONS
Il est destiné à être utilisé par les soignants dans les services cliniques équipés de ces lecteurs.	-
DOCUMENTS DE REFERENCE	DOCUMENTS ASSOCIES
ISO 15189 et 22870	

DESCRIPTION

Le système CoaguCheck est composé des éléments suivants :

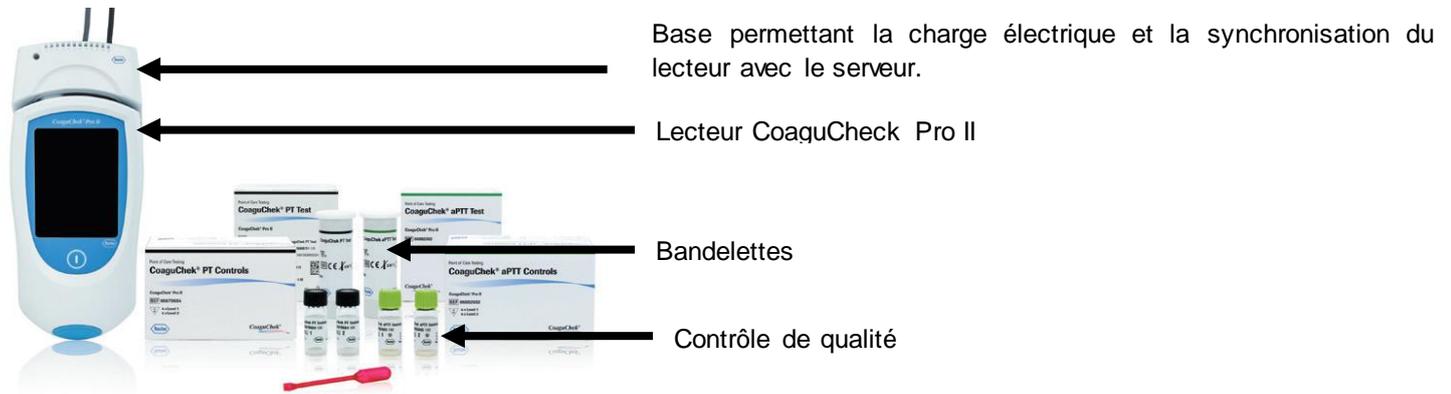


1. REALISATION D'UN TEST :

Laver et sécher les mains du patient à l'eau savonneuse tiède ou chaude (ne pas utiliser de gel alcoolisé, ni d'alcool, ni d'éther.)

Mettre l'automate sous tension après l'avoir retiré de sa base en appuyant sur :



S'identifier grâce à son code agent : après l'avoir retiré du support plastique, scanner votre badge en cliquant sur « Scan »
(Le lecteur de scan est situé sur le côté de l'appareil)

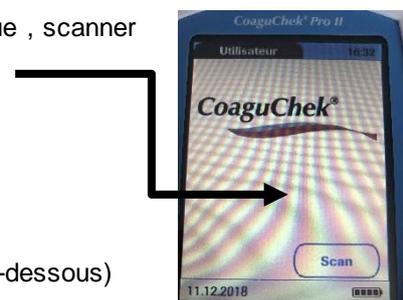

Si votre badge est mal lu, posez le à plat puis scannez le à nouveau (cf. ci-dessous)

Codification :	MO_0477
Version :	4
Date d'application :	28/03/2023
Pages :	2/3




Dans le menu principal, appuyer sur : TEST PATIENT

Sélectionner le bouton « SCAN » puis scanner le numéro de séjour (IEP) de votre patient.



Si une erreur E-102 apparaît lors du scan patient.


Faire un mouvement patient (changement de lit) puis mettre le lecteur sur la base pour qu'il effectue sa mise à jour.

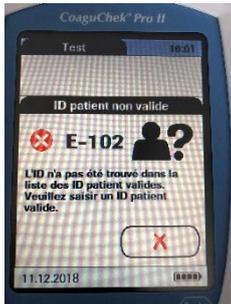

Si sur l'écran principal vous avez : « Blocage CQ ». Téléphoner au laboratoire afin que les contrôles de qualité soient effectués.



Vérifier le numéro de lot de bandelettes et la date de péremption sur le flacon de bandelettes

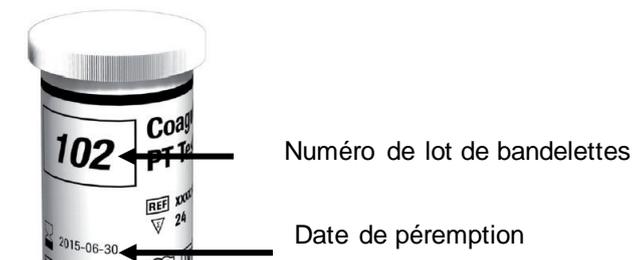

Introduire une bandelette jusqu'à la butée.

bandelette (zone d'introduction en bas) et pousser

UTILISER LE LECTEUR INR COAGUCHEK PRO II

Codification :	MO_0477
Version :	4
Date d'application :	28/03/2023
Pages :	3/3

Reboucher immédiatement le flacon de bandelettes après ouverture.

Ne pas laisser les doigts appuyés trop longtemps sur la zone contact de la bandelette

Le symbole  clignote : vous disposez alors de 180 secondes pour déposer une goutte de sang sur la bandelette.

Masser le doigt pour faciliter la formation d'une goutte de sang

Piquer la pulpe du doigt du patient sur le côté



ATTENTION : Ne Jamais appuyer sur le doigt du patient pour faire sortir une goutte de sang après la pique

Déposer la goutte de sang dans un délai de 15 secondes après la pique, au centre de la zone de dépôt ou sur le côté de la zone de dépôt (zone translucide)

L'automate émet un bip quand la quantité nécessaire de sang pour l'analyse est déposée

Attendre l'affichage du résultat pour enlever la bandelette

Après affichage, retirer la bandelette et la jeter dans la poubelle jaune (DASRI)



Passer au patient suivant et/ou poser l'automate sur la base

2. ENTRETIEN :

Le lecteur et la base peuvent être nettoyés, après les avoir débranchés, à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié d'une solution désinfectante

Ne jamais vaporiser directement de produit sur l'automate et sur la base

Enlever le volet bleu de protection de la zone d'introduction de la bandelette (**attention à ne pas perdre ou casser ce volet sinon le lecteur ne fonctionnera plus**) et nettoyer la glissière d'insertion à l'aide d'un coton tige humide, ne jamais aller au-delà des parties apparentes.

3. RESULTATS :

Si vous n'avez pas noté les résultats, ceux-ci sont disponibles dans l'appareil au nom du patient.

De plus, le fait de reposer le lecteur sur sa base permet le transfert automatique des résultats vers le dossier patient.

En cas de problème, contacter le laboratoire.