


1.  **Maintenir** appuyé le bouton « **START** » jusqu'à ce que le logo « **ACCRIVA** » apparaisse.

2.  **Insérer** la cuvette à **température ambiante** doucement dans la fente et jusqu'à ce que vous entendiez un « **Click** ».


3.  Si la fonction « **Scan** » est activée, **scanner** le code barre en maintenant la pochette de la cuvette à environ 10 cm du scanner et appuyant simultanément sur la touche « **SCAN** ».

4.  **SIGNATURE ELITE** indiquera sur l'écran que le compartiment de tests chauffe jusqu'à 37°C.  
**Ne pas prélever** les échantillons pendant que l'instrument chauffe.


5.  Ne **prélever** que lorsque le « **décompte** » apparaît (« **Countdown** ») et indique le message « **Ajouter l'échantillon** » (« **add sample** »)

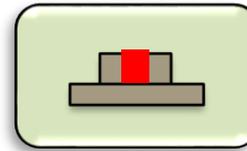

Echantillon correct

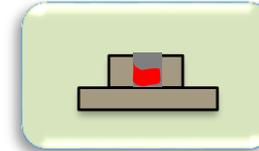

Echantillon « trop petit »

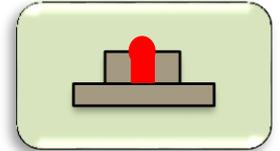

Echantillon « trop grand »

6.  **Ajouter** l'échantillon et **appuyer** sur « **START** ». Le test démarre.

7.  Le **SIGNATURE ELITE** émet un « **beep** » et **affiche le résultat final**, le message « **test terminé** » apparaît. Le résultat reste affiché 5 minutes à l'écran ou jusqu'à ce que la cuvette soit retirée.