



Contrôle Qualité Electronique

Ces contrôles doivent être réalisés quotidiennement à chaque ouverture de salle

1. SELECTIONNER QC

Appuyer sur la touche QC



2. REALISATION AUTOMATIQUE

- « 1 = Run CQE » s'affiche automatiquement : Appuyer sur la touche 1.
- Le CQE se réalise automatiquement :
- « Warming » s'affiche sur l'écran pour vérifier la température.
- « Electronic » s'affiche le temps des décomptes :
 - niveau haut (L2: 300 secondes ou 500 secondes si ACT LR, configurable).
 - niveau bas (L1: 30 secondes).



3. VALIDATION

- Lorsque la procédure CQE est terminée, les informations s'affichent sur l'écran:

- L1 = 30 sec	Pass	- EQC Passed
- L2 = 300 ou 500 sec	Pass	- Test completed
- Temp = 37°C	Pass	- Cancel to exit
- Appuyer sur « Cancel » pour sortir du menu.
- Si le test CQE a échoué, renouveler l'opération