




**1**  
Pré-positionner le piston de la seringue en fonction du volume de sang à prélever



**2**  
Enlever le capuchon de l'aiguille

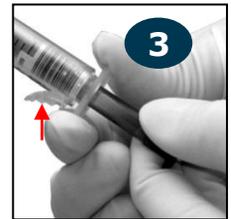

**3**  
Amorcer la sécurité avant le prélèvement




**4**  
La seringue se remplit avec la pression artérielle piston vers le haut



**5**  
Coulisser la protection de l'aiguille jusqu'à entendre un clic



**6**  
Retirer le dispositif de protection en le faisant tourner tout en maintenant le corps de la seringue.

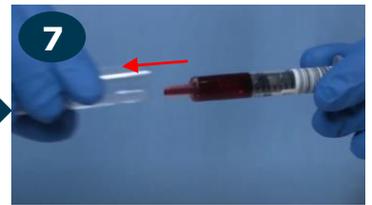

**7**  
Placer le bouchon safeTIPCAP sur le luer. Tournez d'1/4 de tour afin d'assurer l'étanchéité avec le corps de la seringue



**8**  
Déloger les bulles d'air en tapotant sur le corps de la seringue



**9**  
Purger l'échantillon en exerçant une pression lente sur le piston jusqu'à saturation du bouchon et obtention d'une butée



**10**  
Homogénéiser le prélèvement par retournement afin d'agir contre la formation de caillots

**11**  
Assurez-vous que la seringue porte une étiquette avec l'ID patient avant de quitter son chevet

**12**  
Analyser l'échantillon immédiatement ou transmettre rapidement au laboratoire