

1
Pré-positonner le piston de la seringue en fonction du volume de sang à prélever

Purger le cathéter avec plusieurs tubes de purge



Connecter la seringue au montage en tenant le piston orienté vers le haut

3
La seringue se remplit automatiquement avec la pression artérielle


Maintenir le piston vers le haut



Placer le bouchon ventilé *safeTIPCAP* sur le lueur et tournez le d'1/4 de tour afin d'assurer l'étanchéité avec le corps de la seringue



Déloger les bulles d'air en tapotant sur le corps de la seringue

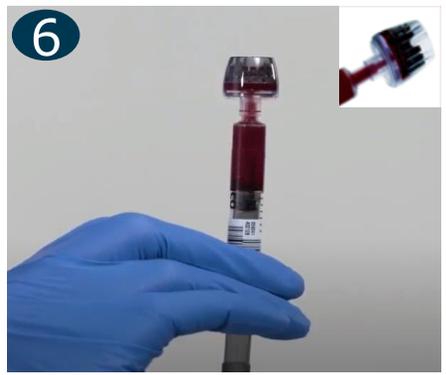

Appuyer doucement sur le piston pour purger l'échantillon jusqu'à sentir une butée



Homogénéiser le prélèvement par retournement afin d'agir contre la formation de caillots

8
Assurez-vous que la seringue porte une étiquette avec l'ID patient avant de quitter son chevet

9
Analyser l'échantillon immédiatement ou transmettre rapidement au laboratoire